

COMPACT MAX (Lector Portátil)

BENEFICIOS:

- ✓ Tiene un rendimiento de lectura de primera clase.
- ✓ Es extremadamente fácil de usar.
- ✓ Su diseño es delgado y original
- ✓ Es ligero con un tamaño de bolsillo
- ✓ Cuenta con una batería de litio de larga duración y recargable.
- ✓ Posee una pantalla de color brillante.
- ✓ Almacena hasta 4'000 códigos de microchips.
- ✓ Transfiere fácilmente códigos a un ordenador personal.



DESCRIPCIÓN:


COMPACT MAX es lo mejor de la tecnología de lectura Datamars en un formato compacto. Gracias a su antena periférica, ofrece las mejores distancias de lectura, es suficientemente pequeño para colocarse en el bolsillo, Lee microchips FDX-B (ISO) y FDX-A / Fecava.

El escáner puede conectarse a una PC a través de su puerto USB y transferir los códigos de los microchips, durante o después de la sesión de lectura. La conexión es directa y sin necesidad de configuración. Ha sido diseñado ergonómicamente para usarlo fácilmente.

Su interfaz es intuitiva y está basada en íconos sencillos que facilitan la lectura. Funciona con cachorros y gatitos, caballos etc. COMPACT MAX ofrece la identificación que necesita.

CLAVES PARA UNA ESCANEO EFICAZ:

1. Sostenga el escáner cerca o sobre el animal.
2. Escanee lenta y repetidamente sobre todo el cuerpo.
3. Encienda el escáner mientras explora el cuerpo del animal, esto debido a que los microchips pueden estar en varias orientaciones dentro del animal.
4. Escanea primero en un patrón horizontal y luego vertical, como se muestra en el diagrama de abajo.
5. Es importante examinar cada animal más de una vez para asegurar que cualquier microchip pueda ser localizados por el escáner.

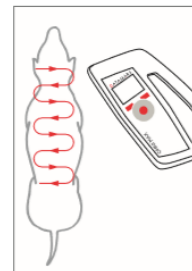

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones:	L160xV80xT20 milímetro
Peso:	170g
Temperatura de funcionamiento:	-5degC a + 55degC, 95% RH, sin condensación
Temperatura de carga:	+ 5degC a + 45degC, 95% RH, sin condensación
Temperatura de almacenaje:	-20degC a + 65degC, 95% RH, sin condensación
Batería:	Li- (1250 mAh)
Com Interfaz:	USB (almacenamiento masivo, VCP y teclado)
Distancia de lectura típica:	FDX-B (134,2 kHz) 12 cm FDX-A / Fecava (125 kHz) 8 cm
Carcasa:	Caja en color blanco ABS, resistente al agua con tapón insertado.
Aprobado:	por CE / FCC en Canadá, Australia y Nueva Zelanda
Estándares:	ISO 11784/5 (FDX-B) Non-synchronizing transceiver

Sujeto a cambio sin previo aviso.